



# RQI 利用方法

## <ユーザー & 管理者>

- ※ユーザー画面/管理者画面は見え方が実際と異なる場合があります。
- ※各施設の設定によっては、アカウント有効化やパスワード変更にメールアドレスが必要な場合があります。(メールが迷惑メールボックスへ届く場合があります)
- ※インターネットのブラウザはChromeを推奨しています。
- ※RQI専用サイトのURLをブックマークしておくとう便利です。
- ※サイトは不定期でアップデートされるため、操作方法が変更になる場合があります。
- ※ご不明点は弊社担当者までお知らせください。

# RQI ユーザー画面

# 1 専用サイトへログイン



日本語 / Japanese ▼

ここからログイン

ログイン

サポート ▼

ようこそレールダルメディカルラーニングサイトへ!

## 心肺蘇生の質向上、RQI

レールダルは、グローバルの優れた団体や機関と連携して、コンピテンシーに基づいた革新的なプログラムを提供しています。患者の生存転機や回復結果の改善促進に寄与できることを誇りに思います。

このサイトにログインすると、管理者から登録される特定のプログラムにアクセス可能です。



**Laerdal**<sup>®</sup>  
helping save lives



各施設の専用URLをブックマークすると次回から便利です専用URLは施設により提供方法が異なります（例：メール 等）

## 2 ユーザー名とパスワードの入力



Log In

Username or email

Password

Remember me

[Forgot password?](#)

パスワードを再設定する  
場合ここをクリック

### 3 パスワードの再設定（2パターン）

Log In

⊗ You need to change your password to continue with your account.

Password Rules :

- Use atleast 8 characters
- Password should contain at least 1 digit, 1 special character and 1 Uppercase char
- Password is case sensitives

New Password

Confirm password

Submit

パスワードは以下を含む必要があります

- ・半角8文字以上
- ・大文字、小文字
- ・数字、記号

新しいパスワードを入力し送信する

B Laerdal helping save lives

日本語 / Japanese

ログイン

サポート

Forgot your password

Email Address\*

SEND

登録メールアドレスを送信する

パスワードリセットのメールが届きます  
メールの内容に従ってパスワード変更してください

パスワードの再設定方法は2パターンあります

① サイト上で変更する場合      ② メールを通じて変更する場合

## 4

## ユーザーのホーム画面

日本語 / Japanese ▼  
ようこそ, Demo2 Demo2  
メニュー ▼

サポート ▼

マイコース ホーム > マイコース

マイコース >  
アカウント情報 >  
ログアウト >

受講中コース | **修了済コース**

修了したコースをみたい場合

コースの検索 [Q] [C]

🔍 選択可能なコース

コース名	登録日	登録者	Eメール	アクション
RQI 2025 Healthcare Provider Prep Assignment	13-04-2021	Yoshihiro Hirakawa	yoshihiro.hirakawa@laerdal.com	選択
RQI 2025 Healthcare Provider	13-04-2021	Yoshihiro Hirakawa	yoshihiro.hirakawa@laerdal.com	選択

受講するコースを選ぶ

コース名	割り当て期日	課題の終了日	アクション
RQI 2025 Healthcare Provider Entry Assignment	NA	14-04-2023	再開

再開するコースを選ぶ

コースは3種類

- RQI 2025 Healthcare Provider Prep Assignment (準備コース)
- RQI 2025 Healthcare Provider (継続コース)
- RQI 2025 Healthcare Provider Entry Assignment (導入コース)

# 5 RQIコース内の画面 <導入コース>



日本語 / Japanese

ようこそ, Demo2 Demo2

メニュー

サポート

## RQI 2025 Healthcare Provider Entry Assignment

ホーム > マイコース > コースの開始

Welcome to RQI® 2025 Healthcare Provider: Entry Assignment  
Steps to Complete the Program:

Complete the RQI Healthcare Provider Entry Assignment that consists of a knowledge check of the AHA Basic Life Support algorithm and guidelines, and a psychomotor assessment of high-quality chest compression and ventilation skills are required to earn an AHA eCredential.

RQI®2025ヘルスケアプロバイダーへようこそ：エントリーの割り当てプログラムを完了する手順：

AHA一次救命処置アルゴリズムとガイドラインの知識チェックで構成されるRQI医療提供者エントリーeCredentialを取得するには、高品質の胸部圧迫と換気スキルの精神運動評価が必要です。

Bem-vindo ao RQI® 2025 Healthcare Provider: Entry Assignment  
Passos para completar o programa:



学習を開始する

RQI 2025 HEALTHCARE PROVIDER ENTRY ASSIGNMENT	タイプ	ステータス	アクション
↳ Manikin Activity: Baseline Skills Check & Core Skills	必須	なし	始める
↳ eLearning: Cognitive Assessment	必須	なし	始める

修了したアクティビティ

修了したアクティビティ	スコア	アクション
↳ Questionnaires		レビュー
↳ Welcome to RQI	100%	レビュー

修了した学習を確認する

# 6 RQIコース内の画面 <準備コース>

日本語 / Japanese ▼  
ようこそ, Demo2 Demo2  
メニュー ▼

サポート ▼

RQI 2025 Healthcare Provider Prep Assignment ホーム > マイコース > コースの開始

Welcome to RQI® 2025 Healthcare Provider: Prep Assignment  
Steps to Complete the Program:

Complete the RQI2025 Provider Prep Assignment to establish foundation of knowledge of Basic Life Support for the healthcare provider. AHA Basic Life Support algorithms, guidelines, and a psychomotor assessment of high-quality chest compression and ventilation skills are required to earn your RQI Healthcare Provider eCredential.

RQI®2025ヘルスケアプロバイダーへようこそ：準備の割り当てプログラムを完了する手順：

医療提供者のための一次救命処置の知識の基礎を確立するために、RQI2025提供者準備割り当てプログラムを完了するには、AHA一次救命処置のアルゴリズム、ガイドライン、およびその精神運動評価が必要です。

Willkommen bei RQI® 2025 Healthcare Provider: Prep Assignment



学習を開始する

RQI 2025 HEALTHCARE PROVIDER PREP ASSIGNMENT	タイプ	ステータス	アクション
↳ Welcome to RQI	必須	なし	始める
↳ Manikin Activity: Baseline Skills Check	必須	現在はロックされています。	🔒
↳ Manikin Activity: Core Skills	必須	現在はロックされています。	🔒
↳ Questionnaires	必須	現在はロックされています。	🔒
↳ eLearning: Cognitive Assessment	必須	現在はロックされています。	🔒

# 7

## 学習画面

学習を中断/終了する

ホームに戻る

JAP

言語設定

### RQIの紹介



再生、音量の変更、字幕の変更等ができます

# 8 RQIコース内の画面 <継続コース>

RQI@2025ヘルスケアプロバイダーへようこそ

プログラムを完了する手順:

四半期ごとに認知評価活動 (CAA) を完了して、臨床行動スキル評価を完了して、高品質のCPRスキルの能力を

欢迎来到RQI@2025医疗保健提供商

完成程序的步骤:

每个季度完成一次认知评估活动 (CAA), 以增强学习高质量CPR技能的能力。



各四半期 (セッションとコアスキル) を修了すると eクレジットを表示できます (スライド15~参照)

RQI 2025 HEALTHCARE PROVIDER	タイプ	ステータス	アクション
Core Skills	必須	期間 30-06-2021	始める
Session 1	必須	期間 30-06-2021	始める
Core Skills	必須	開始 01-07-2021	🔒
Session 2	必須	開始 01-07-2021	🔒
Core Skills	必須		🔒
Session 3	必須	開始 01-10-2021	🔒
Baseline Skills Check and Core Skills	必須	開始 01-01-2022	🔒
Session 4	必須	開始 01-01-2022	🔒

四半期

四半期

四半期

四半期

時期が来るとロックが解除され実施できるようになります

# 9

# さまざまな学習画面1

RQI 2025 Healthcare Provider Entry Assignment

右記のボタンをクリックしてコースから出ることができます >> ホームに戻る

私のRHAPSODEポートフォリオ

学習 0%

知識の継続 ?

課題 ?

- RQI Provider Entry
- RQI ヘルスケアプロバイダー...
- 0% 試験

操作方法はRQI/HeartCode  
取扱説明書参照

RQI 2025 Healthcare Provider Prep Assignment

右記のボタンをクリックしてコースから出ることができます >> ホームに戻る

ベースライン / はじめに

JPN

▶

11

# さまざまな学習画面2

Laerdal RQI 2025 Healthcare Provider Prep Assignment

右記のボタンをクリックしてコースから出ることができます >> [ホームに戻る](#)

1% 進捗状況: RQI ヘルスケアプロバイダー準備コース -57m left

コーチ

RQI ヘルスケアプロバイダー準備コース

コースの概要

## RQI2025 ヘルスケアプロバイダー準備コース

- 救命の連鎖のステップ
- 成人, 小児, および乳児に対して質の高い CPR を行う方法
- AED の使用方法
- 複数救助者による蘇生における効果的なチームダイナミクス
- 一次救命処置における特別に考慮することへの対処法
- 成人, 小児, および乳児における異物による気道閉塞を解除する方法

自動再生  オン

テキストを非表示  閉

Laerdal RQI 2025 Healthcare Provider Prep Assignment

右記のボタンをクリックしてコースから出ることができます >> [ホームに戻る](#)

JPN 三

ベースライン / 成人と小児の圧迫

ナビゲーション画面を開くことができます

Laerdal RQI 2025 Healthcare Provider Prep Assignment

右記のボタンをクリックしてコースから出ることができます >> [ホームに戻る](#)

ベースライン / 概要

JPN 三

成人および小児  
圧迫

約2分

成人および小児  
換気

約2分

乳児  
圧迫

約2分

乳児  
換気

約2分

完了までの所要時間: 約8分 [続ける](#)

## ベースライン: 60 回連続して圧迫を行ってください

**手の位置**  
胸部中央

**テンポ**  
100 ~ 120/分

**リコイル**  
胸部が完全に元に戻ります

**深さ**  
最低 50 mm

**胸骨圧迫テンポ (CCF)**  
中断を最小限にする

ベースラインはガイダンスなしということです

リアルタイムの音声や画像のフィードバックを受けずに完了しなければなりません

© 2020 アメリカ心臓協会およびレールダルメディカル

予定の完成時間: 2分

# 11 カート以外の場所ではスキルパートは実施できません

Laerdal RQI 2025 Healthcare Provider Prep Assignment 右記のボタンをクリックしてコースから出ることができます >> [ホームに戻る](#)

ベースライン / 成人と小児の圧迫

ベースライン: 60 回連続

手の位置  
胸部中央

深さ  
最低 50 mm

© 2020 アメリカ心臓協会およびレールダルメディカル

予定の完成時間: 2分

続ける

🔍 実習用マネキンが検出されませんでした

マネキンはUSBケーブルでしっかりと接続されていますか？

USBがマネキンの側面に接続されていることを確認します。取り外して再度差し込む必要がある場合があります。




🔄 検索しています...

ベースラインはガイダンスなしということです

リアルタイムの音声や画像のフィードバックを受けずに完了しなければなりません

# 14 各フィードバック画面

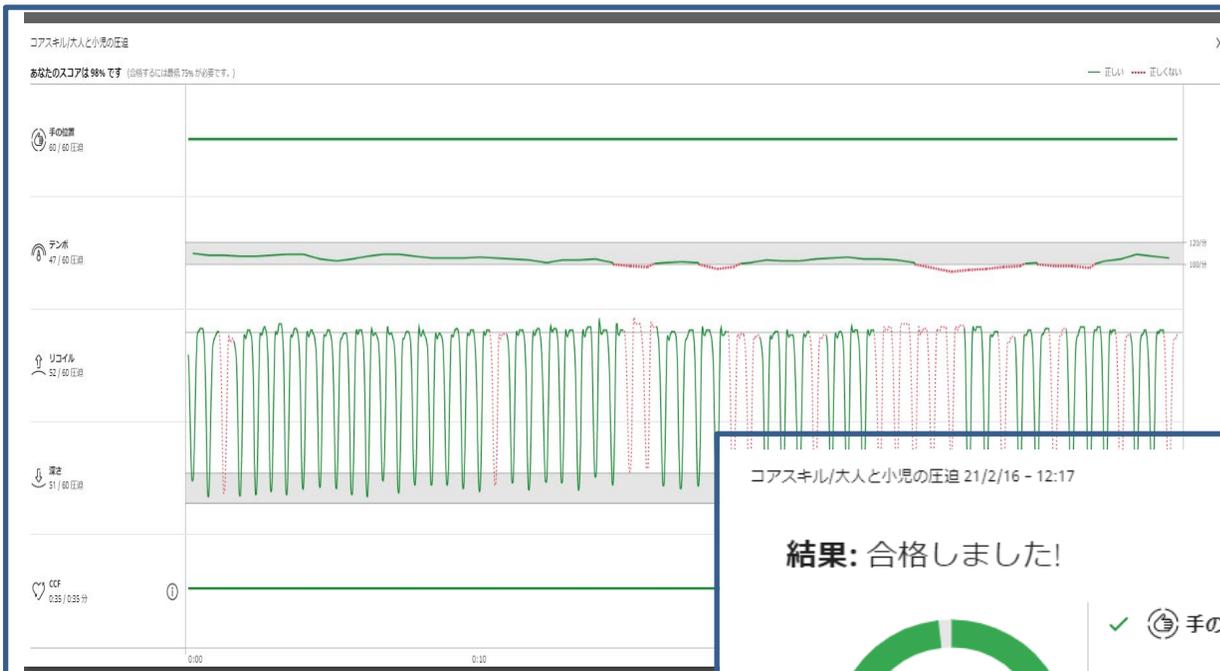

コアスキル/大人と小児の圧迫 21/2/16 - 12:17

**結果: 合格しました!**

75% 合格 **98%** 点数

結果を分析する

- ✓ 手の位置
- ✓ 胸骨圧迫テンポ
- ✓ リコイル
- ✗ 深さ
- ✓ CCF ⓘ

**↓ 深さ**

圧迫の深さを改善する必要があります。

ヒントを見る

# 15 eクレジットおよびeカードの表示

日本語 / Japanese

Laerdal  
helping save lives

サポート

RQI 2025 Healthcare Provider

RQI®2025ヘルスケアプロバイダーへようこそ

プログラムを完了する手順：  
四半期ごとに認知評価活動（CAA）を完了して、臨床知識スキル評価を完了して、高品質のCPRスキルの能力を


RQI Course

eクレジットを表示

各四半期（セッションとコアスキル）を修了すると eクレジット/eカードを表示できます

RQI 2025 HEALTHCARE PROVIDER	タイプ	ステータス	アクション
Core Skills	四半期	期間 30-06-2021	始める
Session 1		期間 30-06-2021	始める
Core Skills	四半期	開始 01-07-2021	🔒
Session 2		開始 01-07-2021	🔒
Core Skills	四半期	開始 01-10-2021	🔒
Session 3		開始 01-10-2021	🔒
Baseline Skills Check and Core Skills	四半期	開始 01-01-2022	🔒
Session 4		開始 01-01-2022	🔒

# 16 eCredentialおよびeCardの表示

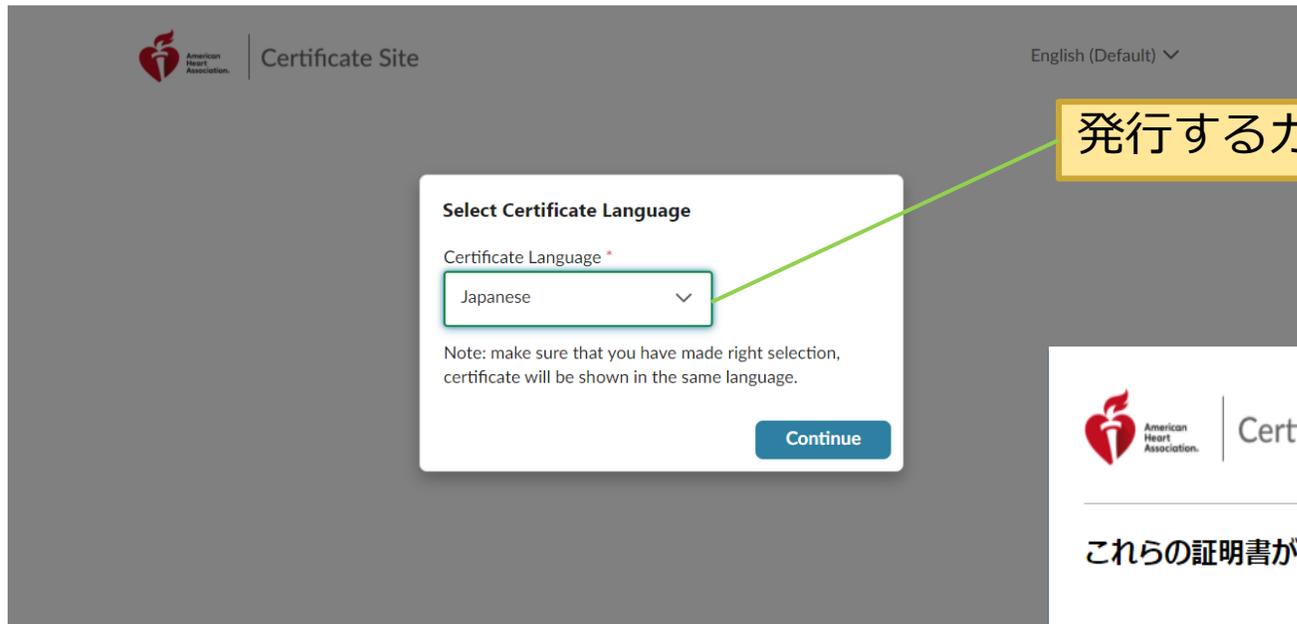

# 17 eCredential

## RQI の eCredential (電子版証明書)

このユニークなデザインは、RQI 2020への積極的、継続的に参加してその能力を証明した医療提供者のための最高水準を表しています。このeCredential を提供する者は、AHA (米国心臓協会) またはほかのプロバイダーが実施するヘルスケアトレーニングの前の以前の要件を十分満たしています。



The image shows a sample RQI eCredential certificate. It features the RQI Verified logo on the left and the American Heart Association logo on the right. The text reads: "eCredential (電子版証明書) RQI 医療提供者". Below this, it states "これは以下のことを証明します BLS (一次救命処置) Demo1 Demo1". A blue banner contains the text: "質の高い心肺蘇生法 (CPR) 能力が証明されました。米国心臓協会のプログラムであるRQI (蘇生の質改善) により、その能力が証明されました". At the bottom, it lists: "eCredentialの有効期限: 30/06/2021", "最後に活動した日: 15/04/2021", and "eCredential番号:". The RQI Resuscitation Quality Improvement logo is also present, along with the text "An American Heart Association and Laerdal Program". A URL for verification is provided: "https://certificates.laerdal.com/eu/certificates".

有効期限：  
次の四半期まで

各四半期の能力がRQIにより証明されます  
四半期ごとに発行されます。

# 18 eCard

無料 - 従来のコース修了ウォレットカード-有効なRQI 2020 eCredentialを有する者用  
従来の2年間の期限の電子カードを提示しなければならない場合があります。上記のRQI 2020 eCredentialは、最高水準を表しています。

一次救命処置		一次救命処置	
<b>BLS (一次救命処置) プロバイダー</b>	 American Heart Association.	<b>RQI RESUSCITATION QUALITY IMPROVEMENT™</b>	RQI所在地 Laerdal Medical Japan
Demo1 Demo1		RQIプログラム の提供者:	米国心臓協会 7272 グリーンビル アベニュー ダラス, TX 75231 RQIQuestions@heart.org
上記の者は、米国心臓協会の一次救命処置 (CPRおよびAED) 蘇生の質改善プログラム (RQI) のカリキュラムに従って、技能およびスキルに対し、高い評価を受けました。		電子カードコード	学生及び雇用者はその信頼性を確認・検証するには、ご自身の携帯端末で、このQRコードをスキャンするか、にアクセスしてください。 <a href="https://certificates.laerdal.com/eu/certificates">https://certificates.laerdal.com/eu/certificates</a>
最終更新 15/04/2021	推奨更新日 30/04/2023		© 2020 American Heart Association (米国心臓協会) 10/20

有効期限  
最終更新日の2年後同月末

QRコードからもeCredential  
/eCard情報を入手できます



# RQI 2025 管理者画面

# 1 RQI管理者専用サイトへログイン



管理者のサインイン

サインイン

## 2 ユーザー名(もしくはメールアドレス)とパスワードを入力



必要情報を入力

# 3

## 各施設名を選択



日本語 / Japanese ▾

ようこそ

ユーザープロフィールを選択してログイン  
ログインしたいプロフィールを選択してください。

Laerdal Medical Japan  
組織管理者

Student

管理者としてログイン  
する場合はこちら

⚠ 各施設名称が表示されます

ユーザーとしてログイン  
する場合はこちら

## 4 管理者ホーム画面



日本語 / Japanese ▼

ユーザー 課題設定 組織設定 レポート▼

- ①ユーザー
- ②課題設定
- ③組織設定
- ④レポート

### ユーザー

名前、メール、ユーザーIDで検索

名前、メール、ユーザーIDで検索

組織レベル: Organization ▼

組織名: Laerdal Medical Japan ▼

フィルター: 登録日

から  To  現在まで

▼ その他のフィルター

## 5

## 管理者ホーム画面

1

ユーザーの個別登録

Laerdal  
helping save lives

日本語 / Japanese

ユーザー 課題設定 組織設定 レポート

## ユーザー

名前、メール、ユーザーIDで検索

名前、メール、ユーザーIDで検索

組織レベル: Organization

組織名: Laerdal Medical Japan

フィルター: 登録日

から To 現在まで

検索 検索を削除

その他のフィルター

ユーザーを作成

人口統計の詳細

名 \*

名

ミドルネーム

ミドルネーム

姓 \*

姓

ユーザーID \*

ユーザーID

電子メール \*

電子メール

組織の詳細

職種

役職を選択

単位情報 \*

追加

Organization

Laerdal Medical Japan

登録日

登録日

取り消す

ユーザーを作成

Showing 1 to 50 of 69 entries ページあたりの行数 50

1 2 Next

アクション項目

ユーザーを作成

ユーザーデータをインポート

ユーザーID	姓	名	ユニット名	職種	登録日	ユーザーステータス	アクション
							...
	demo1	Demo1	Demo1	Laerdal Medical Japan	05-01-2021	有効	...
	demo2	Demo2	Demo2	Laerdal Medical Japan		有効	...
	demo3	Demo3	Demo3	Laerdal Medical Japan		有効	...
	demo4	demo4	demo4	Laerdal Medical		有効	...

ユーザーの詳細を見る  
 ユーザーの詳細を編集  
 電子メールを送信  
 無効に設定  
 グループに追加  
 グループから削除  
 課題を追加  
 課題を削除  
 変更履歴を見る  
 ユーザーを削除  
 パスワードをリセットします。

## 6

## ユーザーの一括登録手順

Yoshihiro H  
Laerdal Medical Jap

課題設定

ユーザー

メール、ユーザー

単位、職種

ユーザーID

emo3

emo2

emo1

tta1

kse1

sma2

yma2

sku2

Sae Kuzuhara

Department

Sales

Administrative Assistant

有効

ユーザーデータをインポート

学習者の人口統計データのCSVをアップロード  
CSVファイルを使用

1. フォーマット済みの空の CSV ファイルをダウンロードするには、ここをクリックしてください。

人口統計の手動インポートは、常に新規および既存の学習者で構成される必要があります

2. コンマで区切った値を使用してデータを提供してください。

3. ファイルを「CSV(コンマ区切り)」タイプで保存するには、[名前を付けて保存] 機能を使用します。..

4. [ファイルの選択] をクリックしてファイルを選択してから、[アップロード] をクリックしてリストをアップロードします。

5. CSV フィールド: 指示 (強調表示されているのは必須フィールドです)

- 組織単位 ID: フィールドの長さは50文字未満でなければなりません。
- 組織ユニット名: フィールド長は 255 文字以内にしてください
- ユーザー ID: フィールド長は 255 文字以内にしてください
- ジョブコード: フィールド長は 255 文字以内にしてください
- ジョブ名: フィールドの長さは250文字未満でなければなりません。
- 名,ミドルネーム, 姓: フィールド長は 50 文字以内にしてください
- 電子メール: Eメールはオプションで、フィールドの長さは255文字未満にする必要があります。
- ステータス: 有効または無効
- 日付形式: 月-日-年 (または) 月/日/年

注: アップロードしたファイルにおいて同じユーザーIDを用いた重複レコードは既存ユーザーを上書きします。

ファイルを選択

アップロード ↑

ユーザー一括登録用のCSVファイルをダウンロードできます

## 7

## 課題設定画面



日本語 / Japanese ▾

[ユーザー](#)
[課題設定](#)
[組織設定](#)
[レポート](#)

個別、一括、グループ毎などに分けて課題（コース）を設定できます

## 課題

ここをクリックして表示 [課題のレポート](#)

課題のタイトル

学習者の検索



[検索を削除](#)
[課題設定](#)

課題のタイトル

◆ タイプ

◆ 課題の割り当て日

◆ 再発

◆ 締め切り期日

◆ 学習者

◆ 選択

◆ アクション

RQI 2025 ヘルスケアプロバイダー 準備コース (Prep)

Regular

13-01-2021

いいえ

0

Manual

...

RQI 2025 ヘルスケアプロバイダー 導入コース (Entry)

Regular

13-01-2021

いいえ

1

Manual

...

RQI 2025 ヘルスケアプロバイダー 継続コース (Perpetual) 追加分

Perpetual

11-08-2020

いいえ

3

Manual

...

## 8

## 組織設定画面

Laerdal Medical Japan

ユーザー 課題設定 **組織設定** レポート

組織階層 職種 グループ ユーザーデータセッティング ユーザーデータレポート 通知

**組織** 組織の詳細

組織の詳細を編集

Institution	組織ID	国
Department	344	Japan
	組織名	会社所在地 1
	Laerdal Medical Japan	Sumitomo Fudosan Ichibancho Bldg, 5F, 8
	組織階層	Ichibancho
	3 levels	会社所在地 2
	Level 1	-
	Organization	市
	Level 2	Chiyoda-ku
	Institution	州/県
	Level 3	Tokyo
	Department	郵便番号

<タブの説明>  
 組織階層：施設情報の編集やセキュリティー設定の変更 など  
 職種：任意の職種の作成や編集 など  
 グループ：任意のグループの作成やグループメンバーの編集 など  
 ユーザーデータセッティング：ユーザーの一括登録（インポート）  
 ユーザーデータレポート：ユーザーデータのエクспорт  
 通知：各種アラート設定

## 9

## レポート画面



ユーザー 課題設定 組織設定 レポート

課題のレポート  
コンプライアンス・レポート  
学習者アクティビティのエラーログ  
通知ログ  
経過報告

日本語 / Japanese

## 課題のレポート

Showing 1 to 50 of 97 entries ページあたりの行数 50

1 2 Next

名前、メール、ユーザーIDで検索

名前、メール、ユーザーIDで検索



組織レベル

Organization

組織名

Laerdal Medical Japan

その他のフィルター

コースフィルター

個別もしくはコースごとに参加者の進捗状況や修了状況を閲覧、レポートすることができます

有効化日 課題のステータス 課題の割り当て日 締め切り

名前	組織	ユーザーID	コース名	有効化日	課題のステータス	課題の割り当て日	締め切り
demo1	Demo1	Demo1	RQI 2025 Healthcare Provider - Trial	04-01-2021	In Progress	04-01-2021	NA
demo1	Demo1	Demo1	HeartCode 2025 BLS Online - trial	23-10-2020	Completed	23-10-2020	NA
demo1	Demo1	Demo1	RQI Healthcare Provider - Prep (Japanese)	15-03-2020	In Progress	13-03-2020	NA
demo1	Demo1	Demo1	RQI 2025 Healthcare Provider Prep Assignment - trial	13-01-2021	In Progress	13-01-2021	NA
demo1	Demo1	Demo1	RQI Healthcare Provider - Entry (Japanese)	13-03-2020	Completed	13-03-2020	NA
demo1	Demo1	Demo1	RQI 2025 Healthcare Provider Entry Assignment - trial	13-01-2021	In Progress	13-01-2021	NA
demo2	Demo2	Demo2	RQI 2025 Healthcare Provider Prep Assignment - trial	14-04-2021	In Progress	13-04-2021	NA
demo2	Demo2	Demo2	RQI 2025 Healthcare Provider Entry Assignment - trial	14-04-2021	In Progress	13-04-2021	NA
demo2	Demo2	Demo2	RQI 2025 Healthcare Provider - Trial	14-04-2021	Not Started	13-04-2021	NA
demo3	Demo3	Demo3	HeartCode 2025 BLS Online - trial	04-11-2020	In Progress	30-10-2020	NA
demo3	Demo3	Demo3	RQI Healthcare Provider - Prep (Japanese)	17-03-2020	In Progress	13-03-2020	NA

# 10 コンプライアンス・レポート画面



ユーザー 課題設定 組織設定 レポート

## レポート

RQI ヘルスケア・プロバイダー - 導入(Entry)

有効な課題: 4  
開始していない学習者: 2  
有効化した学習者数: 4  
コンプライアンス: 50.00%

RQI ヘルスケア・プロバイダー 準備課題(Prep)

有効な課題: 6  
開始していない学習者: 1  
有効化した学習者数: 6  
コンプライアンス: 83.33%

HeartCode 2025 BLS Online -IHF\_Legacy

有効な課題: 3  
開始していない学習者: 0  
有効化した学習者数: 3  
コンプライアンス: 100.00%

HeartCode 2020 BLS Online\_Japanese\_Legacy

有効な課題: 6  
開始していない学習者: 0  
有効化した学習者数: 6  
コンプライアンス: 100.00%

RQI 2025 Healthcare Provider Entry Assignment

有効な課題: 8  
開始していない学習者: 2  
有効化した学習者数: 8  
コンプライアンス: 75.00%

開始していない学習者: 7  
コンプライアンス: 88.71%

# 11 経過報告画面

Laerdal helping save lives

日本語 / Japanese

ユーザー 課題設定 組織設定 レポート

## 経過報告

名前、メール、ユーザーIDで検索

名前、メール、ユーザーIDで検索

組織レベル 組織名

Organization

その他のフィルター

カリキュラムフィル

ユーザーID	姓	名	割り当て名	カリキュラム名	カリキュラムステータス
			HeartCode 2025 BLS Online - trial	HeartCode 2025 BLS Online	Not Activated
			HeartCode 2025 BLS Online - trial	HeartCode 2025 BLS Online	Not Activated
demo1	Demo1	Demo1	RQI Healthcare Provider – Entry (Japanese)	RQI ヘルスケア・プロバイダー – 導入(Entry)	Completed
demo1	Demo1	Demo1	RQI Healthcare Provider – Prep (Japanese)	RQI ヘルスケア・プロバイダー 準備課題(Prep)	In Progress
demo1	Demo1	Demo1	HeartCode 2025 BLS Online - trial	HeartCode 2025 BLS Online	Completed

実施状況を確認できます

## 12 管理者画面の機能/操作について



RQI の管理者画面の機能および操作の詳細  
については本資料をもとに対象者の方へ 別  
途ご説明いたします

